


NÁVOD K OBSLUZE

Model AC017

Monitor pohybu



OBSAH

 UPOZORNĚNÍ	2
INFORMACE K UVEDENÍ DO PROVOZU	3
Nastavení dětské jednotky	4
Umístění senzorové podložky	4
Zapnutí zařízení	5
Seznámení se se zařízením	5
Řešení potíží	7
Záruční podmínky	8
Technické specifikace	8

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKU SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

PŘED MONTÁŽÍ A POUŽÍVÁNÍM VÝROBKU SI POZORNĚ PŘEČTĚTE VAROVÁNÍ A POKYNY.

IGNOROVÁNÍ VAROVÁNÍ NEBO POKYNU MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNE ZRANĚNÍ NEBO SMRT NEBO POŠKOZENÍ PRODUKTU.

DESKA SENZORU NESMÍ BÝT POUŽÍVÁNA DOSPĚLÝMI NEBO DĚTI MAJÍCÍMI 24 MĚSÍCŮ.

NEPOUŽÍVEJTE SENZOROVOU PODLOŽKU KE KONTROLE, ZDA JE DÍTĚ V KOLEBCE.



UPOZORNĚNÍ

Seřazení by mělo být prováděno dospělým.

Při montáži udržujte malé části mimo dosah dětí.

Angelcare® je hrady na všechny své produkty. Pokud nejste spokojeni s výrobkem nebo máte otázky, prosím, kontaktujte nás na adrese:

USA and Kanada: angelcare@cdceinc.ca

Česká republika: podpora@angelcare.cz

UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ

- Dětskou jednotku umístěte mimo dosah dětí (nejméně 1 metr).
- Produkt není hračka. Nikdy nedovolte dětem, aby si s ním hrály.

1. Tento monitor by neměl být používán jako zdravotnické zařízení, jako prostředek k prevenci syndromu náhlého úmrtí dítěte (SIDS). Sledování předčasné narozených dětí, nebo těch, které jsou považovány za ohrožené, by mělo být vždy prováděno pod dohledem zdravotnického odborníka

2. Vždy okamžitě Zkontrolujte své dítě, když zazní pohybový poplach.

3. Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody (např. vana, dřez, atd.).

4. Udržujte zařízení mimo dosah zdrojů tepla (např. trouby, radiátory, atd.).

5. Dětskou jednotku vždy položte na rovnou plochu, vertikálně a zajistěte dostatečnou ventilaci. Neumísťujte na pohovku, polštář, postel nebo jakýkoli povrch, který by mohl bránit volnému proudění vzduchu.

6. Výrobek obsahuje malé části. Montáž provádí dospělá osoba. Opatrně rozbalte a udržujte malé části mimo dosah dětí.

7. Přístroj může být používán při pokojové teplotě mezi 10 °C a 40 °C.

UPOZORNĚNÍ PRO POLOŽKY

8. Snímací podložka obsahuje vyměnitelnou Lithiovou baterii. Náhradní baterie použijte pouze doporučené společnosti Angelcare viz Technické specifikace. Nebezpečí výbuchu, pokud je použita špatná baterie, nebo je nesprávně vyměněna. Informace o správné instalaci baterie naleznete v Uživatelské příručce. Nezakrývejte napájecí svorky Přisluňte-li dětskou jednotku a snímací podložku skladovat delší dobu, vyjměte baterie. Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy. Knoflíková baterie je malá a může způsobit utonutí. Vždy udržujte předměty mimo dosah dětí.

9. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

9.1 Dbejte upozornění – musí být dodržena všechna upozornění v uživatelské příručce.

9.2 Postupujte podle pokynů – musí být dodrženy všechny pokyny pro provoz a použití.

9.3 Voda a vlhkost – Nevystavujte přístroj vodě. Neumísťujte baterie do blízkosti van, dřezů, mytí, nebo jakéhokoli vlhkého prostředí, jako je i bazén. Dbejte na to, aby v jednotkách nebyly žádné předměty a aby žádná kapalina nestíhala otvory do jednotek nebo senzorů.

9.4 Čištění – Před čištěním odpojte jednotku. Neponoujte žádnou část postelbiče do vody. Pro čištění používejte pouze suchou látku.

9.5 Větrání – nezakrývejte větrací otvory. Dbejte na to, aby byl výrobek během používání dobře větrán. Dětskou jednotku nezakrývejte žádným předmětem, například příkrývkou. Nevkládejte zařízení do zásuvky nebo na jakékoli místo, které má tlumicí zvuk nebo brání volnému proudění vzduchu.

9.6 Zdroje tepla – Nepokládejte jednotku na zdroj tepla, jako je radiátor, topení, trouba, televize nebo jiné zařízení, které vyzařuje teplo (např. zsušička). Teplo může poškodit výrobek, nebo elektrické části.

9.7 Přisluňování – používejte pouze přisluňovací určené výrobce. Nepokládejte výrobek na nestabilní místa, stativy, konzolu nebo stůl. Výrobek může spadnout, způsobit vážné poškození dítěte nebo dospělé osoby a vážně poškodit zařízení. Používejte pouze stativy, konzoly nebo psací stůl doporučené výrobcem, nebo prodávané s výrobkem. Instalace výrobku musí být vždy provedena v souladu s pokyny výrobce.

9.8 Údržba – Nepokoušejte se výrobek opravovat sami, protože otevření nebo sejmutí víka (kromě dvířek baterie) vás může vystavit nebezpečnému napájení nebo jinému nebezpečí.

9.9 Náhradní díly – Používejte pouze náhradní díl, který je totožný s výrobcem nebo s originálním konstrukčním dílem. Použití neoficiálních náhradních dílů může způsobit požár, úraz elektrickým proudem a jiná nebezpečí.

9.10 Požární – tento přístroj je určen pouze jako doplněk práce rodičů. Nenahrazuje zodpovědný a přiměřený dohled dospělými osobami a neměl by být používán k jeho náhradě. Přístroj používejte pouze v souladu s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce.

9.11 Vstup předmětů a tekutin – Nikdy netlačte žádný předmět do vnitřku výrobku mezerami v použité, protože mohou ovlivnit nebezpečné napětové body, nebo mohou způsobit požár, nebo úraz elektrickým proudem. Nikdy na výrobek nelijte kapalinu.

9.12 Vibrace – Pokud je snímací podložka aktivní, nepoužívejte pohyblivou dětskou postýlku, ani jiné přisluňovací pro dětské postýlky, které mohou způsobovat vibrace (koločteč). Další zdroje vibrací mohou být ventilátory, pračky, hlasitá hudba apod. Tyto zdroje vibrací mohou ovlivňovat výkon vašeho monitoru Angelcare® a poplach nebude znít, pokud bude systém nadále zachytávat jakýkoli jiný pohyb, než vašeho dítěte. Před použitím monitoru se ujistěte, že všechny zdroje vibrací jsou vyloučeny.

9.13 Falešné poplachy mohou mít několik příčin.

- Po odstranění dítěte z dětské postýlky nebyla Dětská jednotka vypnutá.
- Snímací podložka nebyla správně umístěna pod matraci. Ujistěte se, že je umístěna na plochem a pevném povrchu a logem Angelcare a natisknutým textem nahoru.
- Je také třeba nastavit úroveň citlivosti. Viz Uživatelská příručka Krok 4.3.
Vždy okamžitě Zkontrolujte své dítě, když uslyšíte poplach.

9.14 Pokud vaše dětská postýlka nemá pevné dno, stacionární, zcela plochou, desku nebo rovinu, včetně pružin nebo lamel (rošt, špruše), umístěte výrobek rovinně nad pevnou základnu postýlky a Snímací podložku, abyste zajistili správnou činnost. Vyrovnávací deska musí být větší než plocha Snímací podložky. Tedy rozměry nejméně 33 x 33 cm a tloušťku 6 mm.

9.15 Snímací podložka funguje s jakoukoli velikostí a typem matrace, s výjimkou paměťových pěnových matrací, dutých rámových matrací a vodních postelí. Pevná vyrovnávací deska udržuje stálý tlak na Snímací podložku, což jí umožňuje detekovat pohyby dítěte, i když je dítě na okrajích postýlky.

9.16 Snímací podložka je vyrobená z plastu a neumožňuje cirkulaci vzduchu. Proto by se měla v oblasti senzorové podložky vyvinout pod matrací vlhkost. Doporučujeme pravidelné otáčení a větrání matrace, aby se zabránilo vzniku plísní.

10. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ BATERIE

10.1 VŽDY mějte baterie mimo dosah dětí.

10.2 Snímací podložka obsahuje vyměnitelnou Lithiovou baterii. Náhradní baterie použijte pouze doporučené společnosti Angelcare viz Technické specifikace.

10.3 Nebezpečí poškození, pokud je použita špatná baterie, nebo je nesprávně vyměněna. Informace o správné instalaci baterie naleznete v Uživatelské příručce.

10.4 Nezakrývejte napájecí svorky.

10.5 NEKOMBINUJTE staré a nové baterie v Dětské jednotce

10.6 NEKLOFÍKOVATE představuje malou součástku a nebezpečí udušení. Držte mimo dosah dětí!

10.7 Likvidujte baterie odpovědným způsobem podle Návodů k použití.

10.8 Manipulujte s bateriemi tak, aby nedošlo ke zkratování kontaktů vodivými materiály, náramky, klíčiemi apod.

10.9 Vyjměte baterie z jednotky, pokud produkt skladujete více než 30 dní, protože by mohlo dojít k úniku elektrolytu a poškození výrobku.

10.10 Vyjměte a vyhodte vybité baterie. Pravidelnostou výroby elektrolytu a nevrátit poškození jednotky je vysoké. Pokud baterie vyteklá, nebo se odvdzulinila, poškozenou jednotku i baterii zlikvidujte ekologicky.

10.11 NEPOUŽÍVEJTE tento výrobek, nebo baterie dodávané s tímto výrobkem, nebo určené pro použití s tímto výrobkem, v prostředí s vysokou teplotou a vysokou vlhkostí a vyhýbejte se přímému slunečnímu záření.


INFORMACE K UVEDENÍ DO PROVOZU

Typ AC017


Zařízení pro sledování pohybu dechu

C
Z

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

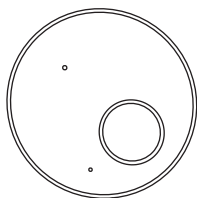

Dětská jednotka

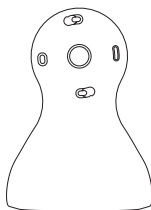

Stojan na stůl
(Dětské jednotky)



Bezdrátová Snímací deska
* Vždy položte logo Angelcare *
směrem nahoru.*



CR3032 baterie
(pro senzor desky)

CO BUDETE POTŘEBOVAT (NENÍ V BALÍČKU):



Mini šroubovák křížový




2 ks AAA alkalické baterie

KROK 1 - NASTAVENÍ DĚTSKÉ JEDNOTKY

DĚTSKÁ JEDNOTKA:

Kontrolka napájení
a úrovně nabití baterie

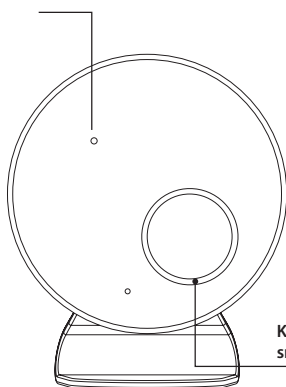

Kontrolka
snímací desky

Tlačítko
Pozastavit/Párovat

Hl. vypínač


Kryt baterií
(2 ks AAA)

Přepínač
citlivosti
snímání

stojánek Dětské jednotky

1.1 – VLOŽTE BATERIE


Při prvním použití Dětské jednotky je třeba vložit 2 alkalické baterie typu AAA (nejsou součástí balení).

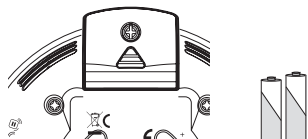

- 1) Sejměte kryt příhrádky na baterie pomocí šroubováku a vložte 2 alkalické baterie typu AAA.

1.2 – VYBERTE MÍSTO PRO DĚTSKOU JEDNOTKU

Dětská jednotka je připevněna na stojanu.

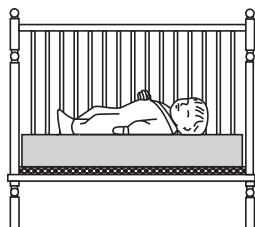


Dětskou jednotku umístěte mimo dosah dítěte



KROK 2 - UMÍSTĚNÍ SNÍMACÍ PODLOŽKY

2.1 – NAPÁJENÍ SNÍMACÍ PODLOŽKY

Při prvním použití čidla musíte vložit přiloženou baterii CR3032.

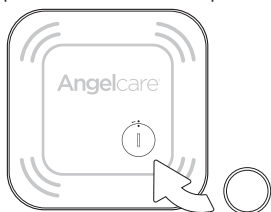

- 1) Sejměte kryt baterie pomocí mince. Otočením ve směru šipky (na desce).
- 2) Do příhrádky vložte přiloženou CR3032 baterii. Poznámka: symbol + směřuje nahoru.
- 3) Kryt baterie otočte do pozice teček. Snímací podložka je nyní aktivní.

2.2 – UMÍSTĚTE SNÍMACÍ PODLOŽKU NA MŘÍŽKU

DŮLEŽITÉ


Pokud dětská postýlka nemá pevné dno, plochou pevnou rovinu, ale pružinový, nebo lamelový rošt (šprušle), umístěte pevnou vyrovnávací desku mezi základnu postýlky a snímací podložku, abyste zajistili správnou činnost. Vyrovnávací deska musí být větší, než plocha snímací podložky. Tedy rozměry nejméně 33 x 33 cm a tloušťku 6 mm

Snímací podložka funguje s jakoukoliv velikostí a typem matrace, s výjimkou paměťových pěnových matrací, dutých rámových matrací a vodních postelí.

Rovná pevná vyrovnávací deska udržuje Snímací podložku bez deformací, což jí umožňuje detekovat pohyby dítěte, i když je dítě na okrajích postýlky.



Překližka

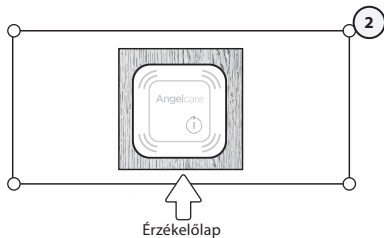


- 1) Vyjměte matraci z dětské postýlky.
- 2) Umístěte snímací podložku do středu postýlky, logem Angelcare® **nahoru**. Pokud potřebujete vyrovnávací desku, měla by být umístěna uprostřed.
- 3) Vraťte matraci zpět do postýlky. **Matrace musí mít se snímací podložkou těsný kontakt!**

! UPOZORNĚNÍ

Snímací podložka nesmí být používána dospělými nebo dětmi staršími 24 měsíců.

- Po uplynutí 24 měsíců věku dítěte by se neměla Snímací podložka používat (s ohledem na hmotnost dítěte). Vyměňte podložku z postýlky a uschovejte pro pozdější použití.
- Před prvním použitím: Zkontrolujte, zda je přístroj připraven k použití. Informace o tom, jak ověřit správnost instalace, naleznete v příručce..

KROK 3 - ZAPNUTÍ ZAŘÍZENÍ

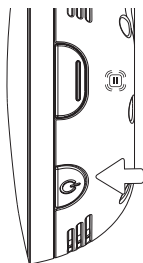

Stiskněte a podržte tlačítko napájení dětské jednotky na 2 vteřiny, dokud kontrolka na přední straně nezačne pomalu blikat zeleně.


Kontrolka Dětské jednotky bude znít a blikat modře pro potvrzení spojení se senzorem.

POZNÁMKA:

Pokud bliká červená, není zelená, nebo pokud existují falešné poplachy, nastavte úroveň citlivosti (**krok 4,3**).

KROK 4 - SEZNÁMENÍ SE SE ZAŘÍZENÍM

4.1 TESTOVÁNÍ INSTALACE SENZORU:

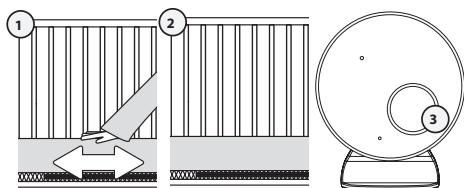

- 1) Jemně položte ruku na matraci.
- 2) Vyměňte ruku z matrace a vzdalte se od postýlky. Po 15 sekundách zazní varování a kontrolka bliká červeně.
- 3) Po 5 sekundách zazní z Dětské jednotky hlasitý alarm a červené světlo na přední straně jednotky bliká, což signalizuje poplach.


POHYBOVÝ ALARM

- Pokud není po 15 vteřinách detekován pohyb, ozve se jedno varovné pípnutí.
- Pokud ani v dalších 5ti vteřinách není detekován pohyb, spustí se pohybový ALARM.

KDYŽ ALARM NEZAZNÍ

- Když je čidlo v provozu, zamezte kontaktu s dětskou postýlkou.
- Přesuňte postýlku k nosné zdi.
- Snízte citlivost snímání podložky.
- Vypněte uspávací, ventilátor, ždímačky a všechno ostatní, co vydává vibrace v okolí dítěte.

ZASTAVENÍ ALARMU

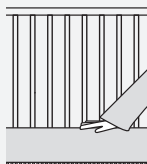

Položte ruku na matraci.

NEBO




Stiskněte tlačítko PAUSE na dětské jednotce.

DŮLEŽITÉ

- Před prvním použitím přístroj Vyzkoušejte. Mimo postýlku, bez dítěte, na stabilním stole.
- Pravidelně testujte správnou funkci zařízení.
- Vyzkoušejte zařízení pokaždé, když přesunete snímací podložku na nové místo.

4.2 POZASTAVENÍ A OPĚTOVNÉ SPUŠTĚNÍ SNÍMÁNÍ:

Umožňuje pozastavit snímání senzoru, když dítě zvednete z dětské postýlky, například při krmení, nebo mazlení.

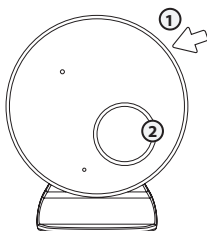

- 1) Stiskněte tlačítko PAUSE v pravém horním rohu Dětské jednotky.
- 2) Když je činnost snímače pozastavena, jeho kruhová kontrolka bliká bíle. Dětská jednotka vydává **jedno pípnutí každých 20 sekund**, což indikuje, že funkce snímače pohybu je pozastavena.
- 3) Chcete-li snímání opět aktivovat, stiskněte znovu tlačítko PAUSE.

DŮLEŽITÉ


- Pokud nezastavíte snímání a po uplynutí 20 sekund nebude na dětské matraci pohyb, zazní alarm.
- Před opětovným uložení dítěte do dětské postýlky znovu aktivujte snímací sensorovou desku.

4.3 – NASTAVENÍ ÚROVNĚ CITLIVOSTI SNÍMACÍ PODLOŽKY:

Citlivost senzoru můžete nastavit tak, aby vyhovovala vašemu dítěti, postýlce a podmínkám uvedení do provozu. Vyšší citlivost pro novorozence, nebo nižší citlivost pro starší a více vážící dítě. Vyšší citlivost je nutná i v případě silnější matrace.

Posunutím tlačítka úrovně citlivosti dítěte přepnete mezi **nízkou, střední a vysokou** úrovní.

- Pro dosažení optimálních výsledků použijte nejprve přednastavenou úroveň citlivosti a teprve v případě potřeby ji zvedněte..

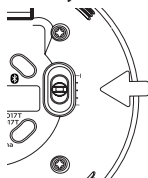

DŮLEŽITÉ

- Snímací podložka (senzor) nesmí být používán dospělými nebo dětmi staršími 24 měsíců.
- Po ukončení používání snímání vypněte funkci snímače pohybu dýchání, vyjměte Snímací podložku z postýlky a uložte pro pozdější využití.


4.4 – BATERIE


INDIKACE NÍZKÉ ÚROVNĚ NABÍTÍ BATERIE DĚTSKÉ JEDNOTKY:

Je-li potřeba vyměnit baterie v Dětské jednotce, bliká **žlutá** kontrolka *slabá baterie* a zní zvukový tón každých 20 sekund.

INDIKACE NÍZKÉ ÚROVNĚ NABÍTÍ BATERIE VE SNÍMACÍ PODLOŽCE:

Je-li potřeba vyměnit baterie ve Snímací podložce, bliká **žlutý** kruh *slabá baterie* a uslyšíte zvukový tón každých 20 sekund.

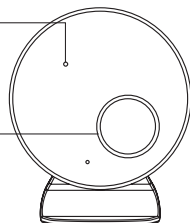

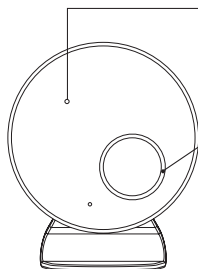

Kontrolka napájení Indikace nízkého stavu baterie	
Bliká zeleně	Přístroj je zapnutý
Bliká žlutě	Baterie dětské jednotky jsou vybité

Kontrolka Snímací podložky	
Bliká červeně	Není detekován pohyb nebo je připojení senzoru přerušeno
Bliká bíle	Zařízení je pozastaveno.
Bliká žlutě	Citlivost snímání je nízká

FALEŠNÉ POPLACHY

- Vypněte dětskou jednotku.
- Dbejte na to, aby mezi matrací a Snímací deskou nebyly žádné lůžkoviny, nebo volný prostor bez kontaktu.
- Pokud je dno postýlky pružné, nebo lamelové s mezerami, umístěte tvrdou desku o rozměru nejméně 33 x 33 cm tloušťce 6 mm (vytvořte tak nové rovné dno postýlky) a teprve na desku umístěte Snímací podložku.
- Ujistěte se, že deska snímače je nainstalována podle pokynů k instalaci. Je možné, že citlivost snímání by měla být zvýšena, viz **Krok 4.3**.
- Znovu propojte Snímací podložku a Dětskou jednotku stisknutím a podržením tlačítka **párování** na dobu 2 vteřin.

ALARM NEZNÍ

- Nedotýkejte se dětské postýlky, když je monitor dechu zapnutý a odejdete od dětské postýlky alespoň 3 metry.
- Přisuňte/připevněte Dětskou postýlku ke stěně - nosné zdi - aby Snímací podložka nezachytávala žádné pohyby z okolí postýlky (pohyby podlahy apod.).
- Podložte Dětskou postýlku měkkým materiálem (guma, filc), který pohltí nežádoucí vibrace okolí.
- Vypněte motory, ventilátory, pohybující se hračky, hlasitou hudbu a všechno ostatní, co může způsobit vibrace.
- Možná budete muset **snížit** citlivost viz **Krok 4.3**.

KONTROLKA SENZORU BLIKÁ ČERVENĚ

- Dbejte na to, aby mezi matrací a Snímací deskou nebyly žádné lůžkoviny, nebo volný prostor bez kontaktu se senzorem.
- Snímací podložka (senzor) vyžaduje pevnou rovinu. Pokud je dno postýlky pružné, nebo lamelové s mezerami, umístěte tvrdou desku o rozměru nejméně 33 x 33 cm a tloušťce 6 mm (vytvořte tak nové rovné dno postýlky) a teprve na desku umístěte Snímací podložku.
- Zkontrolujte, zda je senzor umístěn podle pokynů pro uvedení do provozu. Může být nutné upravit úroveň citlivosti Snímací podložky, viz **Krok 4.3**.

KONTROLKA BLIKÁ MODŘE, PÍPNUTÍ KAŽDÝCH 20 SEKUND - SPOJENÍ ZTRACENO

- Přesunout jednotky blíže k sobě.
- Stiskněte a podržte tlačítko **párování** na Dětské jednotce po dobu 2 sekund. Dětská jednotka pípne a kontrolka bliká modře, aby se potvrdilo připojení.

BEZ NAPÁJENÍ

- Zkontrolujte a v případě potřeby vyměňte baterie.
- Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuto.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A OMEZENÍ

Angelcare® zaručuje původnímu majiteli tohoto výrobku, že Angelcare® monitor je bez jakýchkoli vad materiálu a zpracování po dobu trvání záruční doby (viz níže uvedená záruční tabulka pro určení záruky pro vaši zemi). Pokud tento monitorovací systém nefunguje správně, pokud je použit v souladu s běžnými podmínkami a během záruční doby, Angelcare® bude produkt opravovat nebo vyměňovat dle našeho uvážení zdarma. Kontaktujte prosím svého místního distributora, aby ověřil záruční a záruční dobu.

K produktu musí být přiložen doklad o koupi, nebo jiný doklad prokazující, že monitorovací systém spadá do záruční doby. Angelcare® uhradí náklady na opravu nebo výměnu produktu a zaslání zpět k vám.

Tato záruka se nevztahuje na výrobek, který byl poškozen v důsledku nesprávné údržby, nehody, nesprávného napájecího napětí nebo jakékoli jiné formy zneužití. Záruka je také neplatná, pokud vlastník výrobku jakýmkoli způsobem opraví nebo modifikuje. Angelcare® neručí za žádné náhodné nebo následné škody s ohledem na tento výrobek. Záruka rovněž vylučuje jakoukoliv odpovědnost, která je uvedena výše. Žádná jiná záruka se neposkytuje.

Tato záruka se nevztahuje na výrobky a příslušenství, které nejsou Angelcare®, ani na problémy, které vyplývají z používání, které nejsou v souladu s pokyny k produktu, nedodržení pokynů k produktu nebo problémy způsobené použitím příslušenství, díly nebo součásti, které nebyly dodány společností Angelcare.

ZÁKONNÁ PRÁVA SE V JEDNOTLIVÝCH ZEMÍCH LIŠÍ. NĚKTERÝCH ZEMÍCH NEDOVOLUJE VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD, PROTO SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT.

NEJSME ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM ODPOVĚDNI ZA JAKÝKOLI VÝSLEDEK VYPLYVAJÍCÍ Z POUŽITÍ TOHOTO PRODUKTU.

POZOR! TENTO PŘÍSTROJ ANGELCARE® JE HYGIENICKÝ VÝROBEK. NEBERTE JEJ ZPĚT DO OBCHODU. MÁTE-LI NĚJAKÉ DOTAZY NEBO POTŘEBUJETE POMOC, OBRÁTEŤE SE NA SVÉHO DISTRIBUTORA PŘED VRÁCENÍM PRODUKTU DO OBCHODU.

ZÁRUČNÍ LHŮTY	
Severní Amerika	1 rok
UK, Jižní Afrika, Rusko	1 rok
EU	2 roky

United States and Canada:

Please contact us at: angelcare@cdccinc.ca

Other countries:

Find your local distributor by visiting our website: international.angelcarebaby.com.

Česká republika: podpora@angelcare.cz

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Rozsah:

Otevřený terén (otevřený, Bezbariérový prostor): až 8 metrů.

Napájení:

2 kusy 1,5V AAA alkalická baterie pro Dětskou jednotku (není součástí dodávky)

1 kus 3V CR3032 Baterie pro bezdrátový snímač pohybu (příslušenství)

Pozor: Pro zmírnění rizika úrazu elektrickým proudem nevystavujte výrobek dešti nebo vlhkosti..

Při nesprávném vložení baterií hrozí nebezpečí výbuchu. Baterie Snímač podložky je uživatelsky vyměnitelná lithiová baterie (nikoliv lithiová-iontová) a nelze ji znovu obdržet. Používejte pouze náhradní prvky Doporučené Angelcare®.

Pro informace o náhradních prvcích se prosím obraťte na zákaznickou podporu Angelcare® na www.angelcarebaby.com a na místního prodejce. Kromě náhradních položek najdete jejich pokyny. Udržujte předmět mimo dosah dětí.

Baterie:

- Nepoužívejte staré nebo nové baterie společně.
- Nepoužívejte kombinaci standardních alkalických (uhlíko-zinek) a dobíjecích baterií (ni-CD, NiMH, atd.).

POZOR: NEVHODNÝ TYP BATERIE MŮŽE EXPLODOVAT.

Přenos dat:

Přenos dat mezi Snímač podložkou a Dětskou jednotkou je realizován na 2,402-2,480 GHz.

Maximální síla signálu RF: 4 dBm (2,5 mW)

Angelcare® monitory Inc tímto prohlašuje, že tento přístroj splňuje podmínky směrnice z roku 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je na následující internetové stránce: www.angelcarebaby.com/declaration-of-conformity



OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Symboly přiškrtnutého odpadkového koše znamenají, že v souladu s místními zákony a předpisy by výrobek a/nebo jeho baterie nebo akumulátory neměly být uváděny do komunálních kolektorů. Jakmile produkt nebo položka nebo baterie dosáhnou konce životnosti, vezměte ji do sběrného místa určeného místními orgány. Selektivní sběr a recyklace odpadů mohou pomoci šetřit přírodní zdroje a chránit zdraví a životní prostředí. Informace o vyjmutí baterií a akumulátorů naleznete v uživatelské příručce.

EC DECLARATION OF CONFORMITY



Issue Date: 30 June, 2017

Device (s): Angelcare Model numbers as listed below

Description: Baby Monitors as described in Device list below

Manufacturer: Angelcare Monitors Inc
201 boul. De L'industrie Local 104
Candiac, QC J5R 6A6 Canada

We declare under our own responsibility that the products herein are in accordance with the essential requirements of the relevant Union harmonization legislation –

The Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU.

Relevant Harmonized standards used:

Article 3.1(a) – Health & Safety

EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Article 3.1(b) - EMC

EN301 489-1 V2.2.0

EN301 489-17 V3.2.0

Article 3.2 – Radio

EN 300 328 V2.1.1

Device List –

Model No. AC017 – Movement only Baby Monitor

Authorized Signature:

Roxane Popoviciu, VP Marketing Europe, Angelcare Monitors Inc.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Distributor tímto prohlašuje, že zařízení typu Angelcare® AC017 jsou označena mezinárodním označením CE, což znamená, že výrobky vyhovují mezinárodním evropským a českým normám a pokynům, nezbytným pro jeho uvádění na trh.

PRVNÍ POMOC

.....

Pokud se ozve alarm monitoringu dechu, okamžitě zkontrolujte, zda je poplach skutečný. V případě falešného poplachu zjistěte jeho příčinu, změňte podmínky v dětské postýlce, nebo zvyšte citlivost zařízení.

Okamžitě zkontrolujte životní funkce dítěte:

- dýchání
- srdeční puls
- krevní oběh

Kontrola dýchání je nejjednodušší, vzestupný a sestupný pohyb hrudníku lze snadno vidět pouhým okem. Nakloněním se dolů nad tvář dítěte můžete ucítit dýchání a zvuk z nosu i úst.

Kontrola tepu může být zjištěna na bodech krčních, nebo zápěstních tepen.

Kontrola krevního oběhu. Nejjednodušší způsob, jak sledovat krevní oběh, je vyšetření pleti vašeho dítěte. V případě zdravého krevního oběhu je kůže dítěte růžová. U nedostatečného krevního oběhu, nedostatku kyslíku, je barva pleti modrošedá.

Všechny tři funkce jsou důležité, ale alarm signalizuje, když zařízení **nezachytává** pohyby.

Pokud dítě nedýchá, zavolejte záchranáře na telefonní čísla 155 nebo 112 a proveďte následující opatření pro **udržení životních funkcí**, až do opětovného zahájení životních funkcí, nebo příchodu záchranářů.

Pokud je dítě...	Vhodná naléhavá OPATŘENÍ
...v bezvědomí	Vyrovnejte hlavu dítěte a okamžitě začněte s umělým dýcháním asi 30 krát za minutu.
...nedýchá	Neaplikujte hrudní masáže!
...MÁ PULS	Pokračujte v umělém dýchání, dokud dítě nedýchá samo, nebo dokud nepřijede sanitka.
...v bezvědomí	Vyrovnejte hlavu dítěte a okamžitě začněte s umělým dýcháním 3x vdech, pak 15x hrudní masáž a pak znovu 3x vdech.
...nedýchá	Můžete zastavit akci, až pokud vaše dítě dýchá samo.
... ŽÁDNÝ PULS	

UMĚLÉ DÝCHÁNÍ

1. Narovnejte hlavu dítěte - položte jednu ruku na čelo a dvěma prsty pod bradou (obrázek A). Vraťte hlavu zpět do běžné polohy. Pokud se hrudník dítěte nezvedne po nádechu, okamžitě zkontrolujte, zda je hlava dítěte ve správné poloze. Nejčastějším nedostatkem umělého dýchání je nevhodná pozice hlavy.



2. Dýchání do nosu a úst

Dejte svá ústa na nos a ústa dítěte současně, těsně, jak je to možné. (obrázek B)



3. Tři vdechy

POZOR! Objem dětských plic je malý! Vdechujete **pouze** objem vzduchu zadržovaný ve vašich ústech. Dětský hrudník se zvedá, když vdechuje vzduch a při výdechu klesá. Vdech trvá přibližně 1 až 1,5 sekundy. Dýchací cesty mezi nosem a ústy dítěte musí být volné, k **výdechu dítěte dochází samovolně**. Po vdechnutí zkontrolujte hrudník dítěte, jestli se zvedne (obr. C)



Pokud se dítěti hrudník nezvedá, pak tu může být něco, co uzavírá dýchací cesty. Odstraňte překážku, otočte dětskou hlavu na stranu a menším prstem uvolněte ústa a dýchací cesty dítěte, pak vraťte hlavu dítěte do předchozí polohy a pokračujte v dýchání. (obrázek **D**)



MASÁŽ SRDCE

1. Podmínky k masáži

Potřebujete **pevný povrch**. Pokud není v blízkosti stůl, může být vhodná podlaha. Neprovádějte masáž srdce na matraci, nebo na posteli, protože to může mít za následek poškození páteře dítěte. K nalezení správného tlakového bodu je potřeba svléknout horní částí těla dítěte



2. Tlakový bod

Stlačujte dvěma prsty (prostředníčkem a prsteníčkem) hrudní kost v její dolní třetině, asi 1 prst (1 - 1,5 cm) pod myšlenou spojnicí prsních bradavek (obr. **B**) s frekvencí stlačení cca 120 za 1 minutu u novorozence a 100 za 1 minutu u kojencek



3. Masáž srdce

Stlačení proveďte do hloubky jedné třetiny až poloviny vzdálenosti hrudní kosti od páteře (asi 2 cm).

Poměr stlačení a vdechů je 3:1 u novorozenců a 5:1 u kojenců.

Na konci každého stlačení uvolněte tlak, aniž byste zvedali prsty z hrudníku.

Pohyb musí být pravidelný a vláčný s udržením stejné doby stlačení a uvolnění.

Další způsob masáže je obejmout hrudník rukama a stlačovat hrudní kost oběma palci a kontrolovat, zda se dítě hýbe nebo dýchá.

Poznámky:

záchranka **155** nebo **112**

www.sids.cz